

TEST D'ANÀLISI DE FLUX VAGINAL

Tens picor o
coïssor vaginal?

Dubtes de si és una
infecció per fongs o
un desequilibri de
la flora bacteriana
vaginal?

ESPAI DE SALUT

Soledat, 119 08700 Igualada

Tel.: 93 803 02 97

farmacia@farmaciacasas.com

www.farmaciacasas.com



Farmàcia
Cristina Casas

A la nostra farmàcia pots adquirir el test *Ginecanestest*, que et permet confirmar ràpidament quin tipus d'infecció vaginal pateixes. Basat en la interpretació del ph vaginal i els símptomes.

Si tens picor, un fluxe anormal o d'olor diferent, cal que facis aquest test. T'identificarà si la infecció que tens és causada per una càndida vaginal, una tricomoniasis o una vaginosis bacteriana. Així disminuiràs errors d'automedicació, com per exemple utilitzar un producte per la candidiasis quan en realitat no hi ha infecció per fongs.

INTERPRETACIÓ DEL RESULTAT:

- 1 - Si és una càndida o tricomoniasis, cal que et visiti el teu metge i que tant tu com la teva parella utilitzeu un producte antifúngic que t'indiqui el teu metge o farmacèutic.
- 2 - Si es tracta d'una vaginosis bacteriana és probable que només es degui a un desequilibri de la flora bacteriana. Llavors només et caldrà prendre un suplement de lactobacillus per via oral o utilitzar àcid làctic via vaginal (com per exemple les monodosi de ginecanesbalance).

ACLARIMENTS:

- 1 - Si tens la regla el test no és vàlid. S'ha de fer 2 dies abans o després.
- 2 - Has d'esperar un mínim de 12 hores després de mantenir relacions sexuals per fer el test.
- 3 - La part esfèrica de la varilla no s'ha d'introduir a la vagina, ja que només serveix per ajudar a subjectar.
- 4 - Si estàs embarassada no has de fer aquest test, ha de visitar-te el metge.